




착용 방법

1

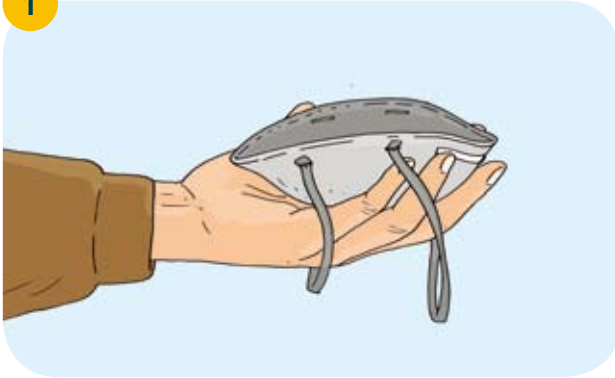

코받침 부분이 손가락 끝에 오도록 손으로 호흡용 보호구를 감싸 진다.

2



한 손으로 호흡용 보호구를 잡고 코, 입, 턱을 덮는다.

3



다른 손을 사용해서 상단 고정끈을 머리 뒤로 넘겨 귀 뒷부분에 걸친다.

4



하단 고정끈을 머리 뒤의 귀 아래부분에 걸친다. 고정끈이 클립 형태인 경우에는, 목 뒤에서 클립을 체결한다.

5



양손 손가락 끝을 사용해서, 코 부위가 자신의 코 모양에 맞도록 코 받침면을 부드럽게 아래로 누른다.

6



양손으로 호흡용 보호구를 덮어서 밀착도 점검을 실시한다. 호흡용 보호구를 통해서 공기를 들이마실 때 호흡용 보호구가 약간 들어가게 된다. 숨을 내쉴 때는 공기가 빠져나가지 않아야 한다.

벗는 방법

1



양손을 사용해서, 하단 고정끈을 잡고 머리 위로 당긴다. 고정끈이 클립 형태인 경우에는, 클립을 해제한다.

2



상단 고정끈을 머리 위로 당긴다.

3



다음과 같은 경우에는 호흡용 보호구를 폐기한다.

- 손상되거나 오염된 경우
- 호흡이 어려워진 경우
- 세균 또는 바이러스와 같은 생물학적 유해인자로 부터 보호하기 위해 사용한 경우

폐기하는 경우에는, 고정끈을 사용해서 작업 안전 절차에 따라 처리한다.

4



다음과 같은 경우에는 호흡용 보호구를 보관 후 재사용을 고려한다.

- 손상되지 않거나 막히지 않은 경우
- 호흡용 보호구를 통한 호흡이 양호한 경우
- 세균 또는 바이러스와 같은 생물학적 유해요인 으로부터 보호하기 위해 사용하지 않은 경우

호흡용 보호구는 재밀봉 가능한 백에 넣어서 눌러거나 접히지 않도록 보관한다.